


KURZANLEITUNG VIO® 300 D

 Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für Einweisung und Gebrauchsanweisung. Die Kurzanleitung enthält keine Sicherheitshinweise. Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen in den Gebrauchsanweisungen vertraut.

Notwendige Bedienschritte

1 Gerät einschalten




5 Neutralelektrode überwachen



Prüfen Sie bei rotem Neutralelektroden-Symbol:

- Neutralelektrode korrekt mit dem Gerät verbunden?
- Lange Kante der Neutralelektrode zeigt zum OP-Feld?
- Neutralelektrode hat genügend Kontakt zur Haut?

2 Programm wählen

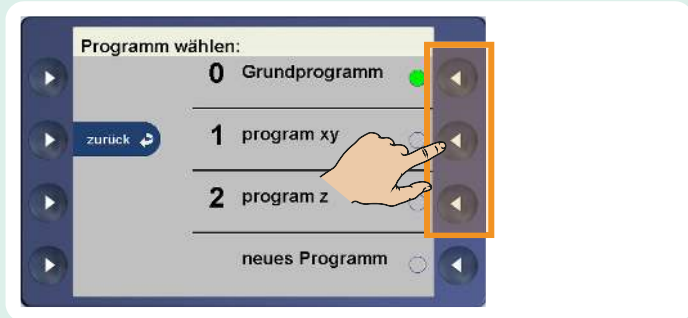


6 Instrumente anschließen



ACHTUNG: Monopolare Stecker mit 4 mm Ø dürfen Sie nur an die Buchse mit blauem Ring (1) anschließen. Andernfalls beschädigen Sie das Gerät.


3 Einstellungen prüfen

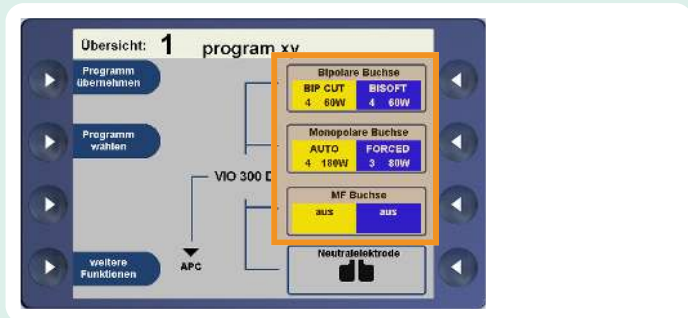

7 Für APC-Anwendungen Argonflasche öffnen





4 Neutralelektrode applizieren und anschließen

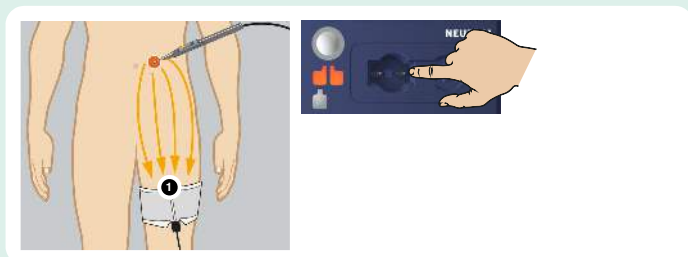

Die lange Kante der Neutralelektrode (1) muss zum OP-Feld zeigen.

Optionale Bedienschritte


8 Mode ändern

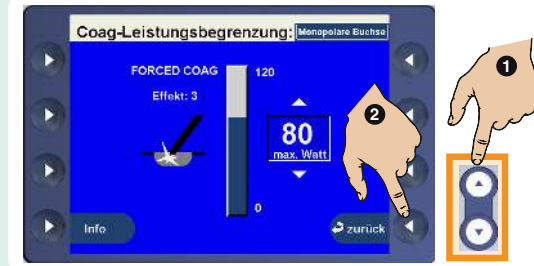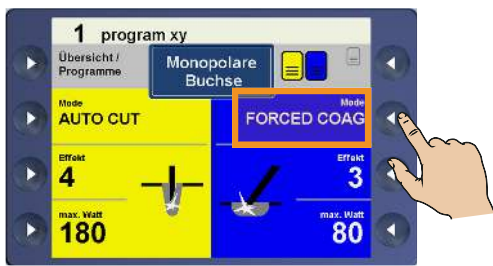


11 Focus View einer Buchse aufrufen



9 Effekt ändern

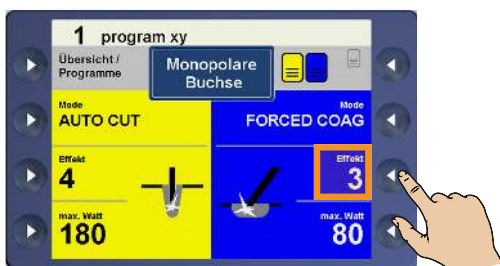

12 Fußschalter oder AUTO START zuweisen

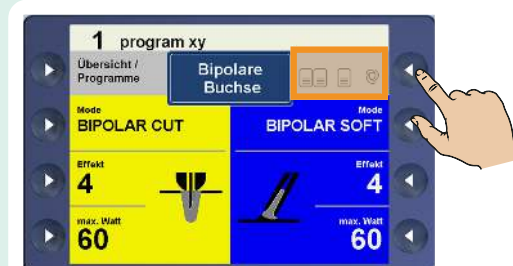

10 Leistungsbegrenzung ändern

